

actim FECAL BLOOD uzimanje uzoraka izmeta/stolice za analizu

1.
Stavite izmet/stolicu na toaletni papir ili u čistu posudu (za jednokratnu upotrebu).
2.
Otvorite flašicu koja sadrži otopinu/tekućinu.
Uzmite uzorak izmeta/stolice štapićem koji je smješten na poklopcu. Promiješajte krajem štapića izmet na više raznih mjesta tako da se samo brazde na kraju popune (slika 1).
3.
Odstranite višak izmeta tako što toaletnim papirom prebrišete štapić. Količina izmeta je dovoljna ako se obadvije brazde na kraju štapića popune (slika 2).
Veća količina izmeta/stolice nije potrebna.
4.
Vratite poklopac sa štapićem natrag u flašicu sa otopinom/tekućinom i zavrnite poklopac. Nakon toga promućkajte flašicu sve dok se izmet potpuno izmiješa sa otopinom (slika 3).
5.
Sada je uzorak spreman za analizu.
Nakon uzimanja uzorka flašica se drži na sobnoj temperaturi ili u frižideru. (2-8⁰ C).
Uzorak treba predati na ispitivanje u roku od sedam dana.
Pažnja!
Otopina se ne smije piti.
Sadrži NaN₃ kao sredstvo za konzerviranje, < 0,1%.

Slika 1

Slika 2: Kraj štapića pod povećalom
Brazde na kraju štapića
napunjene izmetom

Slika 3

Orion Diagnostica

ORION DIAGNOSTICA AB [d.d.]

Tel: 08-623 64 40