


actim Fecal Blood Test

SAMPLING


1. Mettere una piccola quantità di feci in un contenitore pulito.
2. Aprire il flacone di diluizione del campione e prelevare una piccola quantità di feci utilizzando il bastoncino di campionamento attaccato al tappo a vite. Girare il bastoncino in più punti del campione in modo che entrambe le fessure sull'estremità del bastoncino contengano il campione. (figura 1).

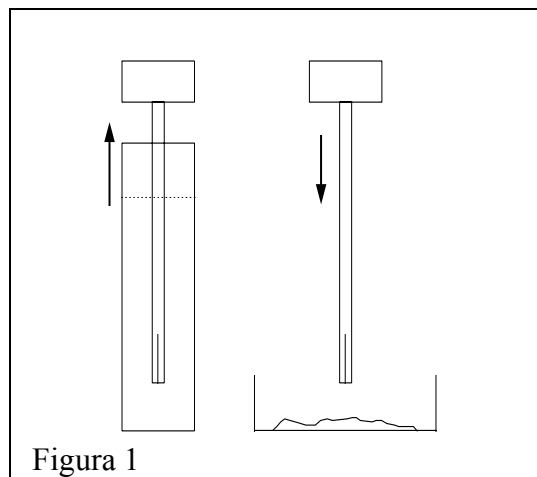

3. Rimuovere gli eccessi di feci, per esempio battendo il bastoncino su un pezzo di carta. La quantità di campione è ottimale quando entrambe le fessure del bastoncino contengono feci. (figura 2).

L'eccesso di campione può inficiare il test.

4. Rimettere il bastoncino campionatore nel flacone e chiudere il tappo. Agitare il flacone per sospendere il campione nel tampone (figura 3).

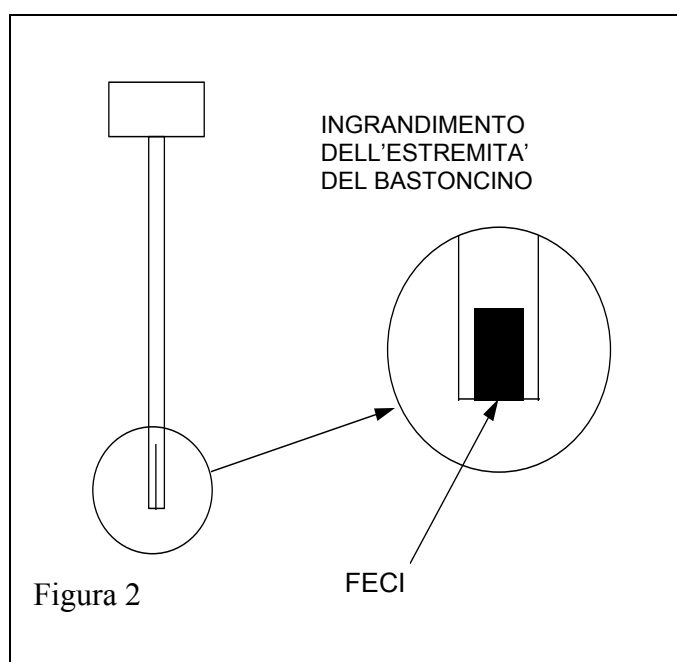

5. Inviare il flacone al laboratorio. La sospensione di campione deve essere testata entro una settimana. Conservare il flacone contenente la sospensione di campione in frigorifero (2 - 8 °C), o a temperatura ambiente.

Nota !

Non bere il liquido contenuto nel flacone.

OI30303-1

MEDIX BIOCHEMICA OY AB
Kauniainen Finland

