



actim™ Fecal Blood Test  
Cat 30371ETAC, Cat 30372ETAC, Cat 30331ETAC

نمونه شهژگرن

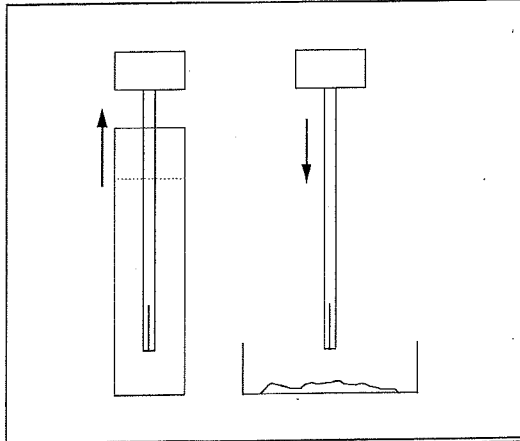


۱  
پیساییه که یان له سهه کاغزیکی توالت پوکهن یان  
بیکه نه ناو قوتووه کی حاوینه وه که ته نیا یه ک جار  
به کار بهیژی.

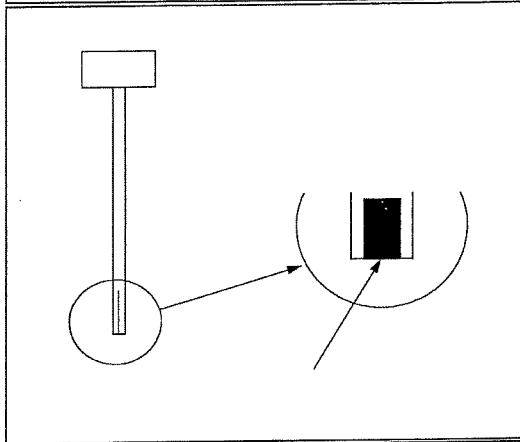

۲  
قوتووه که که شلاویکی تیدایه بکه نه وه. بهو چیلکه به  
که به ته په دوری سهه قوتووه که وه به نمونه ی  
پیساییه که شهژگرن. چیلکه که به شوینی جیاوازی  
پیساییه که دا بگرن تا قه لشتی سهه قیلکه که  
په ده بی (وینه ی ۱).

۳  
پیسایی زیاده ی دهه قیلکه که به کاغزی توالت  
حاوین که نه وه. شه بهه پیساییه که له سهه دوو  
قه لشتی سهه قیلکه که دا کو ده بیته وه به سه بو  
شیکردنه وه (وینه ی ۲).

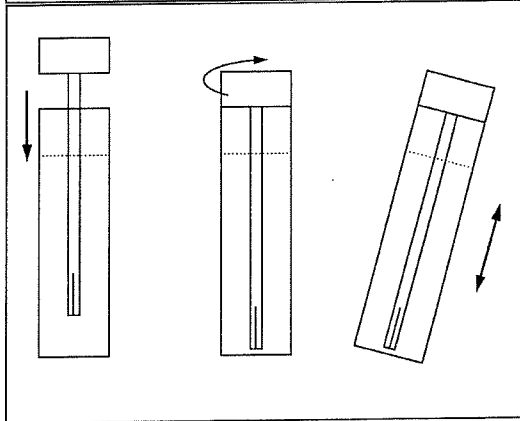

۴  
ته په دوری سهه قوتووه که به چیلکه که وه بکه نه وه  
ناو قوتووه که و به باشی قایمی که نه. له پاشان  
قوتووه که نه وه بکه نه بشله قین تا پیساییه که  
به ته او ی له گه شلاوه که تیکه ل ده بی (وینه ی ۳)

۵  
قوتووه که به زووترین کاتی گونجاو په وانه بکه نه بو  
تاقیکه بو شیکردنه وه. نمونه که ده بی له  
ماوه ی هه فته یه که دا له دوی نمونه شهژگرنه که  
شیکردنه وه. له دوی نمونه شهژگرنه که  
ده تان قوتووه که یان له گه مای ناومایدا ویان  
له سه لاجه دا (2-8 C) پاگرن.

ته گه چه ندین نمونه ی پیسایی پیویست بی  
ده بی نمونه کان له پوزی جیاوازا شهژگرن.

سهه نهج!

شلاوه که نابی بخوری.

ماده ی  $\text{NaN}_3$  ی تیدایه بو پاگرن و کونزیرف کردن،  $<0,1\%$ .

ته و زانه ی له ته مینکداین که بتوان دوگیان بن نابی له کاتی خوینی مانگانه دا شه جوره نمونانه شهژگرن.

OR30303-3  
MEDIX BIOCHEMICA OY AB  
Grankulla Finland