

actim™ Fecal Blood Test
Cat 30371ETAC, Cat 30372ETAC, Cat
30331ETAC

INSTRUCCIONES

- 1.**
Coger un poco de excremento con un trozo de papel higiénico o en otro envase de un solo uso.
- 2.**
Abrir el tubo que contiene líquido.
La prueba del excremento debe de cogerse con el palito que va sujeto al tapón. Meter el palito girando en diferentes partes del excremento hasta que los surcos en el palito se llenen (figura 1).
- 3.**
Quitar el exceso de excremento limpiando el palito con papel higiénico.
La cantidad de excremento es suficiente cuando los dos surcos en la punta del palito están llenos (figura 2).
- 4.**
Meter el palito con el tapón en el tubo y enroscarlo.
Agite el tubo hasta que el excremento se haya mezclado completamente con el líquido (figura 3).
- 5.**
Mandar el tubo cuanto antes al laboratorio.
La prueba debe de analizarse antes de una semana desde la toma de la misma.
El tubo se puede guardar a temperatura ambiental o en la nevera (2-8 grados).
Si se necesitan varias pruebas se deben de tomar diferentes días.

¡ATENCIÓN! El líquido no se debe de ingerir.

