

INFORMATION TILL VÅRDPERSONAL SOM LÄMNAR UT MATERIEL TILL PATIENTER INFÖR KAPILLÄR PROVTAGNING AV HbA1c.

Provtagningsmateriel distribueras kostnadsfritt från Laboratoriemedicin Dalarna, Klinisk kemi efter kontakt med tfn 023-49 21 57.

Provtagningsmateriel

- filtrerpappersremsa
- provtagningsrör som innehåller vätska
- transporthylsa (plastburk)
- frankerad svarspostetikett

Gör så här:

Märkning av rör och transporthylsa

1. Märk provtagningsröret med 10-siffrigt personnummer med tuschpenna.
2. Märk transporthylsan med etikett från journalsystemet. Sätt etiketten lodrätt på samma sätt som märkning av provrör.

Förberedelser

1. Stoppa märkt provtagningsrör och filtrerpappersremsa i den märkta transporthylsan.
2. Överlämna till patienten
 - förberett provtagningsmateriel
 - instruktion för provtagning (patientinstruktion)
 - provpåse med frankerad svarspostetikett.

Hållbarhet

Provtagningsrör med vätska, är hållbart 1 år i kylskåp.

Be patienten ta provet ca 10 dagar före nästa återbesök!

DOKUMENTHISTORIK

Sida	Förändring
	Tagit bort information om pappersremiss då inte sådan används längre