

INFORMATION TILL VÅRDPERSONAL SOM LÄMNAR UT MATERIEL TILL PATIENTER INFÖR KAPILLÄR PROVTAGNING AV HbA1c.

Provtagningsmateriel distribueras kostnadsfritt från Laboratoriemedicin Dalarna, Klinisk kemi efter kontakt med tfn 023-49 21 57.

Provtagningsmateriel

- filtrerpappersremsa
- provtagningsrör som innehåller vätska
- transporthylsa (plastburk)
- frankerad svarspostetikett

Gör så här:

Märkning av rör och transporthylsa

För pappersremiss

1. Märk provtagningsröret med den lilla streckkodsetiketten märkt HbA1c från remissens baksida.
2. Märk transporthylsan med den stora streckkodsetiketten märkt HbA1c från remissens baksida.

För elektronisk remiss

1. Märk provtagningsröret med 10-siffrigt personnummer med tuschpenna.
2. Märk transporthylsan med etikett från journalsystemet. Sätt etiketten lodrätt på samma sätt som märkning av provrör.

Förberedelser

1. Stoppa märkt provtagningsrör och filtrerpappersremsa i den märkta transporthylsan.
2. Om pappersremiss används fyll i patient-ID och svarsomtagare.
3. Överlämna till patienten
 - förberett provtagningsmateriel
 - ifylld, eventuell pappersremiss
 - instruktion för provtagning (patientinstruktion)
 - provpåse med frankerad svarspostetikett.

Hållbarhet

Provtagningsrör med vätska, är hållbart 1 år i kylskåp.

Be patienten ta provet ca 10 dagar före nästa återbesök!

DOKUMENTHISTORIK

Sida	Förändring
1	Förtydligat märkningen av transporthylsan