

Uppresningslyft MiniLift 160EE

MiniLift160EE är en mobil uppresningslyft som är utvecklad för att, på ett så skonsamt sätt som möjligt, hjälpa patienten att resa sig från sittande till stående position. Tillsammans med rätt lyfttillbehör får patienten stöd under fötterna, mot framsidan av underbenen samt bakom ryggen, vilket ger en trygg och säker och samtidigt aktiv uppresning.



Köps in då utgående uppresningslyftar är slut på lager.

LDHnr 58865 Uppresningslyft MiniLift160EE med elektrisk benbreddning inkl vadband

Maximal belastning:	160kg
Totallängd:	1060mm
Hjuldimension:	100mm
Rek brukarlängd:	140-200cm

Saxat ur bruksanvisning: Uppresningslyft Minilift 160 får endast användas inomhus och på plant golv. Lyfttillbehören skall vara rätt utprovade i förhållande till patientens behov och funktioner. Max belastning får under inga omständigheter överskridas. För att förflytta med MiniLift160 skall brukaren kunna; belasta sina ben och förstå och följa instruktioner. Endast DirectHealthcareGroups uppresningsselar får användas till Minilift.

Tillbehör:

	Rekommenderad brukarvikt	Lyftvästens längd
LDHnr 58864 ThoraxSling M	50-80kg	104cm
LDHnr 58863 ThoraxSling L	70-110kg	124cm

ThoraxSling är en anpassad och mycket bekväm uppresningsväst som används tillsammans med uppresningslyft MiniLift160EE. Den är lätt för medhjälparen att applicera samtidigt som den ger patienten en extra trygghetskänsla vid uppresning och ståträning. ThoraxSling underlättar också vid toalettbesök.

DirectHealthcareGroups eget utprovningsprotokoll:

https://www.directhealthcaregroup.com/app/uploads/utprovningsprotokoll_minilift-ver3-2.pdf

Äldre uppresningslyftar som fortsatt cirkulerar i retursortimentet.

LDHnr 50653 Uppresningslyft el Molift Quick Raiser 1 inkl U-bygel

Max brukarvikt:	160 kg
Totalbredd:	610mm
Bredd fram:	340mm
Totallängd:	1070mm
Längd underrede:	955mm
Höjd underrede:	70mm
Höjd lyftarm:	990-1730mm



Foto: Etac

Lyftbygeln är U-formad och går att fälla upp för att inte vara i vägen när man kör in lyften mot brukaren.

Underbensstöden är ställbara i höjdlöd och överkanten ska placeras 2 fingrar nedanför knäskålen. De är asymmetriska och vändbara

Tillbehör:

Justerbar fotplatta

Sandaler

Extra mjuk polstring för underbensstöd

Uppresningssealar:

Finns i storlek XS-XL, varav upphandlade

LDHnr: 50655 Uppresningssele Molift RgoSling StandUp stl M

LDHnr: 50656 Uppresningssele Molift RgoSling StandUp stl L

Max brukarvikt 300 kg



Foto: Etac

LDHnr 32344 Uppresn lyft el Sabina II EE bas u bygel

Max brukarvikt:	150 kg
Breddjustering min/max:	530-1005mm
Totallängd:	1060mm
Hjuldimension:	75mm
Höjd lyftarm:	800-1725mm

Tillbehör:

LDHnr: 32345	Bygel Sabina II 350mm
LDHnr: 32405	Comfortbygel Sabina II 600mm
LDHnr: 39929	Stussbandsbygel Sabina II
LDHnr: 33385	Fotstöd Sabina/Sabina II
LDHnr: 33083	Hälstöd Sabina II
LDHnr: 31798	Stussband Sabina



Foto: Liko

Uppresningselar Sabina:

Comfortvästar

LDHnr: 34577 Comfortväst Sabina Comfort S

LDHnr: 30539 Comfortväst Sabina Comfort M

LDHnr: 30538 Comfortväst Sabina Comfort L

Får endast användas tillsammans med Comfortbygeln



Foto: Liko

Uppresningsvästar Sabina:

LDHnr: 24540 Uppresn väst Sabina S

LDHnr: 24237 Uppresn väst Sabina M

LDHnr: 24238 Uppresn väst Sabina L

LDHnr: 24413 Uppresn väst Sabina XL

Används tillsammans med 350mm bygeln



Foto: Liko

Trygghetsvästar Sabina:

LDHnr: 30303 Trygghetsväst Sabina M

LDHnr: 30305 Trygghetsväst Sabina L

Används tillsammans med 350mm bygeln



Foto: Liko