

Godkänt
2019-05-10Giltigt t.o.m
2022-05-10Versionsnummer
2.0

Diarienummer

Disk- och spoldesinfektor - kontroll av

Regelbundna kontroller av disk-och spoldesinfektorer

Dagliga kontroller

Diskdesinfektor

- att diskarmarna lätt kan rotera
- att spolhålen på diskarmarman är rena på över- och undersida
- att diskmedelsåtgången är rimlig, rita ett nivåstreck och skriv datum på diskmedelsdunken
- att inga föremål har fallit ner på botten
- att grovsilen är fri från skräp, rensa rent vid behov
- att eventuella insatser dockar ordentligt mot vattenanslutning

Datera och signera listan som sparas i pärm/loggbok

Spoldesinfektor

- att spolmunstyckena lätt kan rotera efter packning
- att munstycken och spolhål är rena och inte igensatta
- att diskmedelsåtgången är rimlig, rita ett nivåstreck och skriv datum på diskmedelsdunken
- att avloppet är fritt från skräp

Datera och signera listan som sparas i pärm/loggbok. **Inspektera efter varje process att godset ser rent ut för ögat.**

Fläckar på godset-felsökning

- Är maskinen rätt lastad?
- Finns diskmedel?
- Hur är vattenkvalitén, joner/salt/ kalk?
- För snabb torkningsprocess, saltrester kvar?
- Har sköljmedlet ett lågt PH-värde?

Årlig kontroll

En gång per år samt vid reparation skall maskinen funktionstestas. Detta ombesörjes inom landstinget Dalarna av Medicinsk teknik (MiT).

Dagliga rutinkontroller av diskdesinfektor

Desinfektorns inventarienummer:.....

Klinik:..... Avdelning:.....

Vecka	måndag	tisdag	onsdag	torsdag	fredag	lördag	söndag



