

Serum/plasma hålls av i plaströr, artikelnr: 49711 (klar, genomskinlig 75 x 13 mm)

Undantag:

Länsdelslaboratorierna håller av CDT i alikvoteringsrör (tillhandahålls från Falun)

Hålls alltid av		
Ext	Analys	Kommentar
1H	Insulin, C-peptid	Fryses inom 24 h
23	Koagulation (andra analyser än PK)	Kontrollera hållbarheten, måste ofta frysas. Om PK är beställt på samma rör hålls hela röret av och frysas.
33	Läkemedel	
3A	Apo-kvot	
43	P-Hemoglobin	
72	Heparin/Apixaban	Fryses
80	Zink	

Behöver inte hållas av om ankomst till Falun provtagningsdagen.		
Hålls av om ej ankomst till Falun provtagningsdagen.		
Hålls av om ankomst till Falun på helg.		
Ext	Analys	Kommentar
03	Endast Digoxin	
9K	KUB	Fryses inom 24 h
28	PTH	
29	MMA	
MP, MS	HIV/Hepatit PCR	

Behöver inte hållas av på vardagar.

Hålls av efter sista transporten på fredag till söndag eftermiddag.

Ext	Analys	Kommentar
01	Rutinkemi	Behöver ej hållas av om man har transport till Falun på helgen.
03	Hormon, B12, Folat (ej Digoxin)	Behöver ej hållas av om man har transport till Falun på helgen.
05	HCG	
08	Proteiner	
10	Osmolalitet, plasma	
26	Cancermarkörer	
27	Homocystein	
2A	ANCA	
31	CDT	
32	LD, Litium	Behöver ej hållas av om man har transport till Falun på helgen.
47	Prolaktin	
52	Läkemedel	
59	D-vitamin, Hormoner	

Hålls inte av.

Ext	Analys	Kommentar
37	Allergi	
53	Bik, fritt Ca	Korken får ej öppnas.
55	PSA	Plasma hållbart 3,5 dygn. Hålls av och fryses om denna tid överskrids.
MA, MB MC, MD MF	Serologi till mikrobiologen	

DOKUMENTHISTORIK

Förändring i aktuell utgåva

Sida	Förändring
3	Lagt till tabell "Hålls inte av", som tappades bort i förra utgåvan.