

Godkänt  
2026-06-25

Giltigt t.o.m  
2029-06-25

Versionsnummer  
1.0

Diarienummer

## Sortimentsöversikt hjälpmedel för privata möbler

**Uppresningsstöd för säng har för närvarande förskrivningsstopp pga säkerhetsmeddelande. Nytt beslut tas i september 2026**

Nedan beskrivet sortiment är upphandlat i 7-klövern från och med 20260601

Den här sortimentsöversikten visar nuvarande sortiment. Förskrivna hjälpmedel kan vara av en tidigare modell med samma funktion som inte finns med här, och/ eller rekonditionerat.

---

### Innehåll

Förskrivning .....	2
Produktbeskrivning .....	2
Kontaktinformation.....	2
Leverantörer .....	2
Hjälpmedel för privata möbler .....	3
Förhöjningsklotsar .....	3
Förhöjningskloss byggbar 85x85mm .....	3
Förhöjningskloss Bull bendiameter 30-60mm.....	3
Förhöjningskloss Reko .....	4
Förhöjningskloss Magnum.....	5
Fristående lyftbåge till privat säng.....	5
Fristående lyftbåge Human Care .....	5
Elryggstöd för privat säng.....	6
Sängryggstöd el mittplacerad motor .....	6

## **Förskrivning**

Beskrivna hjälpmedel i sortimentsöversikten kan provas ut själv av förskrivare.

## **Produktbeskrivning**

Hjälpmedel som kan användas för att anpassa privata möbler.

## **Kontaktinformation**

Epost: [adl.hjalpmedelscenter@regiondalarna.se](mailto:adl.hjalpmedelscenter@regiondalarna.se)

Hemsida: [regiondalarna.se/dhc](https://regiondalarna.se/dhc)

## **Leverantörer**

Aktuella leverantörers namn och hemsidor

[ComfortSystem](#)

[Human Care](#)

[Swereco](#)

---

## Hjälpmedel för privata möbler

Mer information om artiklar i sortimentet finns i Visma webSesam

### Förhöjningsklotsar



#### Förhöjningskloss byggbar 85x85mm

**Beskrivning:** Stycke packad förhöjningskloss.

**DHC-nr:** 38459

**MDR:** Ja


**Specifikation:** Byggbar höjd 3,5, 7 och 10,5 cm, höjd förhöjningskloss 3,5 cm. Under normala omständigheter är max antal staplade klossar 3 st. Om höjden, inklusive klossar, är mindre än möbelns bredd och mindre än möbelns djup kan 4 klossar staplas. Max belastning 200kg (dvs möbel plus person/personer) fördelat på en möbel med 4 ben.

**Tillbehör:**

**DHC-nr:** 38461 Ring till förhöjningskloss byggbar

**Förskrivningsbar via förskrivarportal:** Ja

**Kan beställas till verksamhet:** Ja

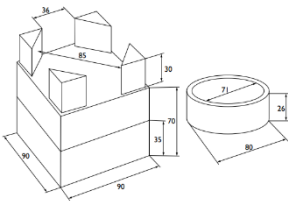

**Övrig info:** Får enbart användas vid förhöjning av sängar och övriga möbler så som större bord, soffor, fåtöljer. Vid smala svarvade ben (mindre än 35 mm) skall tillbehöret Ring (DHCnr 38461) användas. Alla ben på möbeln ska ha samma antal klossar. Använd inte klossarna om de har skador eller sprickor. Information hämtad från Human Care



#### Förhöjningskloss Bull bändiameter 30-60mm

**Beskrivning:** 4-pack förhöjningsklossar och 12 distansklossar.

**DHC-nr:** 59616

**MDR:** Ja

**Specifikation:** Byggbar höjd: 7,5, 10, 12,5 och 15 cm, höjd yttermått 25cm. Höjd distanskloss 2,5 cm. Max 3 distansklossar får användas i varje förhöjningskloss. Maxbrukarvikt 320kg inkl möbelns vikt fördelat på alla fyra ben.

**Reservdel/tillbehör:**

**DHC-nr:** 59617 Distanskloss till förhöjningskloss Bull

**Förskrivningsbar via förskrivarportal:** Ja

**Kan beställas till verksamhet:** Ja

**Övrig info:** Förhöjningskloss Bull används för förhöjning av exempelvis stol, säng eller bord. Förhöjning kan fås med 75, 100, 1250 och 150 mm. Bull greppar tillräckligt mycket om benet så att möbelen kan flyttas utan att benet skadas.

Passar till möbelben:

1. Kvadratiska ben upp till cm 6 cm Ø
2. Runda ben till 3-6cm Ø
3. Ovala ben upp till 3X6 cm Ø
4. Rektangulära ben upp till 3X6 cm Ø

Produkten får ej brukas på annat sätt än vad som är avsett. Möbelen måste stå på bottenplattan eller distansklossen, dvs. inte vila mot övre kanten av förhöjningsklossen. Kan lämna avtryck i plastmattor. Kontrollera att möbelen inklusive klossar står stadigt före användning. Information hämtat från Swereco



### Förhöjningskloss Reko

**Beskrivning:** 4-pack förhöjningsklossar och 12 distansklossar.

**DHC-nr:** 59614

**MDR:** Ja

**Specifikation:** Invändigt mått 6x6 cm, byggbar höjd 5, 7,5 10, 12,5 och 15 cm höjd yttermått 20 cm. Höjd distanskloss 2,5 cm. Max 4 distansklossar får användas i varje förhöjningskloss. Ingen begränsning avseende brukarvikter.

**Reservdel/tillbehör:**

**DHC-nr:** 59615 Distanskloss till förhöjningskloss Reko (styck)

**Förskrivningsbar via förskrivarportal:** Ja

**Kan beställas till verksamhet:** Ja

**Övrig info:** Förhöjningskloss Reko används för förhöjning av exempelvis stol, säng eller bord. Produkten får ej brukas på annat sätt än vad som är avsett. Samtliga ben skall höjas lika mycket. Möbelen skall alltid stå på bottenplattan eller distansklossen. Den får inte vila mot övre kanten av förhöjningsklossen. Var uppmärksam på att detta gäller även om benen är koniska. Kan lämna avtryck i plastmattor. Information hämtat från Swereco

**Förhöjningskloss Magnum****Beskrivning:** 4-pack förhöjningsklossar och 12 distansklossar.**DHC-nr:** 38464**MDR:** Ja**Specifikation:** Invändigt mått 100x100mm. byggbar höjd 50, 75,100, 125 och 150mm höjd yttermått 200mm. Höjd distanskloss 25mm. Max 4 distansklossar får användas i varje förhöjningskloss. Ingen begränsning avseende brukarvikter.**Reservdel/tillbehör:****DHC-nr:** 38463 Distanskloss till förhöjningskloss Magnum (styck)**Förskrivningsbar via förskrivarportal:** Ja**Kan beställas till verksamhet:** Ja**Övrig info:** Förhöjningskloss Magnum används för förhöjning av stol, sängbord mm. Magnum passar även för bredare ben eller sängar med sockel. Produkten får ej brukas på annat sätt än vad som är avsett. Samtliga ben skall höjas lika mycket. Möbeln skall alltid stå på bottenplattan eller distansklossen. Den får inte vila mot övre kanten av förhöjningsklossen. Var uppmärksam på att detta gäller även om benen är koniska. Kan lämna avtryck i plastmattor. Information hämtat från Swereco**Fristående lyftbåge till privat säng**

Mer information om artiklar i sortimentet finns i Visma webSesam

**Fristående lyftbåge Human Care****Beskrivning:** Max brukarvikt 110kg**DHC-nr:** 64357**MDR:** Ja**Kompatibel med:** Säng utan höjdställning**Specifikation:** Benens/fötternas höjd är 7 cm. Frigång under ben/fötter är 2 cm. Höjd från golv till greppet på trapetsen kan variera mellan 104 – 140 cm. Höjd från infästning av kätting till trapetsens grepp kan variera mellan 30 – 66 cm. Vikt: 12 kg. Lyftbågen kan belastas med upp till 70 kg beroende på hylsplacering. Detta motsvarar en maximal brukarvikt på ungefär 110 kg.**Ersättningskedja:** Ligger i ersättningskedja med fristående lyftbåge MerryRise 48016 och fristående lyftbåge Mario 30537**Förskrivningsbar via förskrivarportal:** Ja**Kan beställas till verksamhet:** Ja

**Övrig info:** Lyftbågen är avsedd att hjälpa brukare att lyfta överdelen av kroppen medan de ligger i en vårdäng och användas med sängar som har höjdjustering eller som inte är försedda med höjdjustering. Får endast användas som förflyttningshjälpmedel vid säng. Samtliga ben och fötter måste vara i kontakt med golv vid användning. Information hämtat från Human Care.

## Elryggstöd för privat säng

Mer information om artiklar i sortimentet finns i Visma webSesam



### Sängryggstöd el mittplacerad motor

**Beskrivning:** Sängryggstödet placeras på en befintlig säng, mellan sängbotten och bäddmadrass, och fixeras med hjälp av spännrem.

#### DHC-nr:

61822 Sängryggstöd Comfortabel Compact el b80 exkl stödhandtag

59625 Sängryggstöd Comfortabel Compact el b90 exkl stödhandtag

59626 Sängryggstöd Comfortabel Compact el b105 exkl stödhandtag

59627 Sängryggstöd Comfortabel Compact el b120 exkl stödhandtag

**MDR:** Ja

#### Kompatibel med DHC-nr:

44655 Sittlås Comfortabel

44654 Stödhandtag Comfortabel

47534 Spännrem Comfortabel 350cm

**Specifikation:** Finns i bredderna 80, 90, 105 och 120 cm, Ryggvinkel 0-70°  
Produkten är avsedd för vuxna personer som är minst 146cm långa, väger minst 40kg och har ett BMI-värde som motsvarar minst 17. Produkten och tillhörande hjälpmedel är avsedd för personer äldre än 12 år. Max brukarvikt 145kg

**Ersättningskedja:** Ligger i ersättningsgrupp med sängryggstöd el med sidoplacerad motor.

**Förskrivningsbar via förskrivarportal:** Ja

**Kan beställas till verksamhet:** Ja

**Övrig info:** Sängryggstödet placeras på en befintlig säng, mellan sängbotten och bäddmadrass, och fixeras med hjälp av spännrem. Vid montering på sängar utan huvudgavel rekommenderas Sittlås (tillbehör). Använd en stadig bäddmadrass 4–10 cm tjock, denna skall placeras uppe på ryggstödet. Bäddmadrassen bör inte ha en glatt yta som glider i sidled mot ryggstödet. Spännremmens lås skall ej placeras ovanpå bädden utan under eller på sidan av sängen. Det finns annars risk att låsen på spännremmen öppnas av belastningen från brukaren. Information från ComfortSystem.

---