

Etac introducerar nytt modulärt hjulsystem till Prio och Cross.

Etac introducerar ett nytt hjulsystem med uppdatering av drivhjul, framgafflar och länkhjul för att öka rullstolarnas hållbarhet och funktionalitet. Den nya designen påverkar inte inställningsmöjligheterna på rullstolarna.

Drivhjul C6

Nya drivhjul C6 kommer att ersätta nuvarande drivhjul C5 på rullstolar utan VB.

Skillnaden ses på drivringsinsfästningen, C5 har fyra fästen medan C6 har sex fästen. Även färgen på navet skiljer dem åt.

Befintliga drivhjul C5 med vårdarbroms kommer fortsätta användas på Etacs rullstolar med vårdarbroms men får nytt svart massivt däck.

Nya C6



- 6st fästen för drivringen
- Nav i ett stycke maskinbearbetad och svartanodiserad aluminium

Används på **rullstol Cross 6 och Prio, båda konfig 2025-**

Befintliga C5



- 4st fästen för drivring

Används på **Cross 5 XL och Cross 5/6 rullstolarna konfig 2021-2025 samt äldre Prio konfig 2021-2024.**


Mutterstycke och QR-axel

Mutterstycke till C6



Mutterstycke med större "huvud" och rund form.
Passar **Cross 6 och Prio, båda konfig 2025-**

Mutterstycke till C5

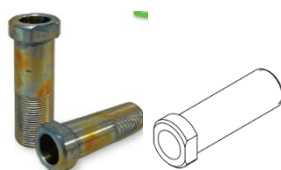

Mindre "huvud" samt två runda sidor och två raka.
Passar **Cross 5 och 6 konfig 2021-2025 och Prio konfig 2021-2024.**

QR-axlar till C6



-QR-axlar med stor svart knapp
Passar **Cross 6 och Prio, båda konfig 2025-**
OBS! Får inte användas på drivhjul C5.

QR-axel till C5



Nuvarande QR-axel
Passar **äldre Cross och Prio.**
OBS! Får inte användas på C6

OBS! Den befintliga C5 QR-axeln går att sätta i C6 drivhjulen men den blir glapp/ranglig och kommer ej låsa hjulet, då axeln är mindre i diameter och kortare.

Drivringar

De nya drivringarna med 6 infästningar för C6 finns i aluminium, rostfritt, plastade och hårdanodiserad aluminium (benämning hård al i Sesam). Alla har nya distanser mellan hjul och drivring. Den plastade drivringen är uppdaterad med nytt material. Drivringarna passar ej C5 drivhjul.



Framgafflar

Nya framgafflar med navbredd 45 mm ersätter nuvarande framgafflar med 57mm navbredd. Den nya designen möjliggör en starkare framgaffel och ett minskat svängutrymme. Framgaffelfästena förändras inte i nuläget.

Stål gaffel




Nuvarande gafflar



Länkhjul

Nya länkhjul

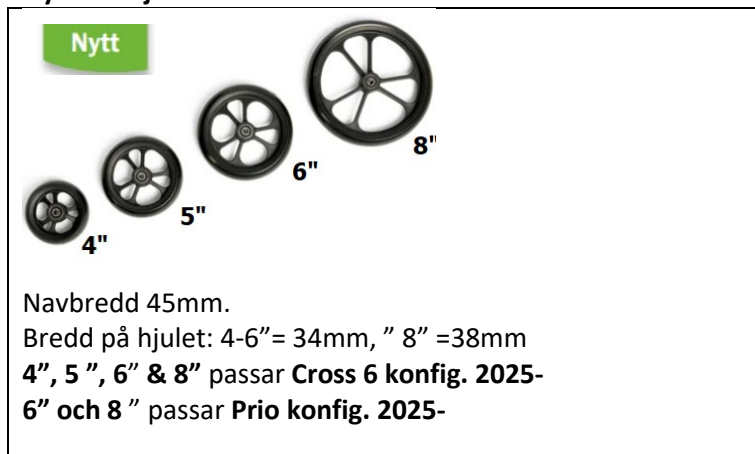

Nuvarande länkhjul



Det nya 6" länkhjulet kommer att ersätta nuvarande 6" och 6,5" länkhjul. Nya 6" länkhjul rullar lättare på hårda ytor samt är bredare för att klara mjuka ytor bättre.

Det nya 8" länkhjulet är designat med samma kontur som gamla 8" 200 x 50 hjulet



Konfiguration och artikelnummer

I samband med att det nya hjulsystemet infördes i vår konfiguration av rullstol Prio (början av 2025) fick vi nya artikelnummer på dessa stolar. Från och med 1 december så infördes hjulsystemet på Cross 6 och 5 XL därav infördes nya artikelnummer även på dem. Vi använder ersättningskedja, vilket innebär att de äldre stolarna går ut först om de finns i lager.

OBS! Vi får inte kombinera gamla och nya delar enligt Etac, det är därför viktigt att kolla vilken rullstolsmodell man har innan man byter några delar. Detta ser man enklast genom att kolla artikelnummer, benämningen på rullstolen eller individbeskrivningen.

Konfigurationerna nedan visar hur vi köpt/köper in stolarna. Hur de är inställda när de går ut till brukaren ser man på individbeskrivningen.

Prio konfiguration 2021-2024	NYA Prio konfiguration 2025-
Rullstol Prio VB: Drivhjul VB C5 massiva däck Plastade drivringar (4 infästningar) Gaffel och länkhjul med navbredd 57mm Rullstol Prio: Drivhjul C5 Luftpumpade däck Plastade drivringar (4 infästningar) Gaffel och länkhjul med navbredd 57mm	Rullstol Prio VB: Drivhjul VB C5 massiva däck Plastad drivring (4 infästningar). Gaffel och länkhjul med navbredd 45mm Rullstol Prio: Drivhjul C6 massiva däck Plastade drivringar (6 infästningar) Gaffel och länkhjul med navbredd 45mm

Cross 6 och Cross 6 VB (std & långt chassi) Konfiguration 2021-2025 (samma gäller Cross 5)	NYA Cross 6 och Cross 6 VB (std & långt chassi) Konfiguration 2025-
Rullstol Cross 6 VB: Drivhjul VB C5 massiva däck Plastade drivringar (4 infästningar) Gaffel och länkhjul med navbredd 57mm Rullstol Cross 6: Drivhjul C5 Luftpumpade däck Plastade drivringar (4 infästningar) Gaffel och länkhjul med navbredd 57mm	Rullstol Cross 6 VB: Drivhjul VB C5 massiva däck Plastad drivring (4 infästningar). Gaffel och länkhjul med navbredd 45mm Rullstol Cross 6: 24" Drivhjul C6 luftpumpade däck Plastade drivringar (6 infästningar) Gaffel och länkhjul med navbredd 45mm
Cross 5XL VB konfiguration 2014-2025	NYA Cross 5XL VB konfiguration 2025-
Rullstol Cross 6 VB: Drivhjul VB C5 massiva däck Plastade drivringar (4 infästningar) Gaffel och länkhjul med navbredd 57mm	Rullstol Cross 5XL VB: Drivhjul VB C5 massiva däck Plastad drivring (4 infästningar). Gaffel och länkhjul med navbredd 45mm

Vid frågor

Kontakta Team Sitta Stå Träna