


Sortimentsöversikt

Portabla ramper och tröskelramper

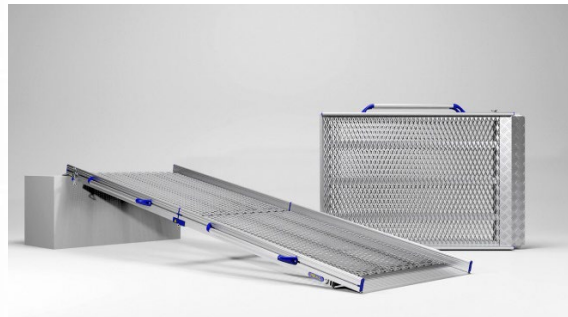

Gäller från 20241101

Gäller från 2024-11

2 meters ramp avsedd för manuella rullstolar

T200	Ramp, tvådelad teleskopisk, Feal AB	
F200	Ramp, tvådelad vikbar, Feal AB	
U2	Ramp Perfolight, teleskopisk, Kvistberga AB	utanför avtal
V20	Ramp Perfolight, vikbar, Kvistberga AB	utanför avtal



	T200	(T200-3)	F200	(U2)	(V20)
Artikelnummer	32563	32711	32564	57045	57050
Vikt/par	300 kg	300 kg	300 kg	300 kg	300 kg
Invändig bredd	19 cm	17 cm	21 cm	19,5 cm	21 cm
Min/max längd	116/202 cm	87/199 cm	102/201 cm	117/203 cm	102/200 cm
Avåkningshöjd	5 cm	5 cm	5 cm	4,5 cm	4,5 cm
Vikt/styck	5,6 kg	6 kg	6,3 kg	5,6 kg	6,3 kg
Max höjd	40 cm	40 cm	40 cm	40 cm	40 cm

2 meters ramp avsedd för eldrivna elrullstolar

F200	Ramp, tvådelad vikbar, Feal AB	
FW200	Ramp, tvådelad vikbar, Feal AB	utanför avtal
E2	Ramp Perfolight, tvådelad vikbar, Kvistberga AB	
V20	Ramp Perfolight, tvådelad vikbar, Kvistberga AB	utanför avtal



	F200	(FW200)	E2	(V20)
Artikelnummer	32564	50157	57042	57050
Maxbelastning/par	300 kg	300 kg	300 kg	300 kg
Invändig bredd	21 cm	27 cm	26,5 cm	21 cm
Min/max längd	102/201 cm	108/213 cm	107/212 cm	102/200 cm
Avåkningskant höjd	5 cm	5 cm	4,5 cm	4,5 cm
Vikt/styck	6,3 kg	8,0 kg	8,1 kg	6,3 kg
Max höjd	40 cm	40 cm	40 cm	40 cm

3 meters ramp avsedd för manuella rullstolar

FT300	Ramp, tredelad vikbar teleskopisk, Feal AB	utanför avtal
FTW300	Ramp, tredelad vikbar teleskopisk, Feal AB	utanför avtal
T300	Ramp, tredelad teleskopisk, Feal AB	utanför avtal
U3	Ramp Perfolight, tredelad, teleskopisk, Kvistberga AB	
V30	Ramp Perfolight, tredelad vikbar teleskopisk, Kvistberga AB	




	(FT300)	(FTW300)	(T300)	U3	V30
Artikelnummer	37776	35470	32562	57047	57051
Max belastning/par	250 kg	250 kg	250 kg	250 kg	250 kg
Invändig bredd	19 cm	25 cm	17 cm	18 cm	19,5 cm
Min/max längd	101/276 cm	107/295cm	116/285 cm	117/288 cm	102/277 cm
Avåkningshöjd	5 cm	5 cm	5 cm	4,5 cm	4,5 cm
Vikt/styck	8,6 kg	11,4 kg	8,2 kg	8,1 kg	8,4 kg
Max höjd	60 cm	60cm	60 cm	60 cm	60 cm

3 meters ramp avsedd för eldrivna rullstolar

FT300	Ramp, tredelad vikbar teleskopisk ramp, Feal AB	utanför avtal
FTW300	Ramp, tredelad teleskopisk ramp, Feal AB	utanför avtal
E3	Ramp Perfolight, tredelad vikbar teleskopisk ramp, Kvistberga AB	
V30	Ramp Perfolight, tredelad vikbar teleskopisk ramp, Kvistberga AB	



	(FT300)	(FTW300)	E3	V30
Artikelnummer	37776	35470	57043	57051
Max belastning/par	250 kg	250 kg	250 kg	250 kg
Invändig bredd	19 cm	25 cm	25 cm	19,5 cm
Min/max längd	101/276 cm	107/295 cm	107/300 cm	102/277 cm
Avåkningshöjd	5 cm	5 cm	4,5 cm	4,5 cm
Vikt/styck	8,6 kg	11,4 kg	8,6 kg	8,4 kg
Max höjd	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm

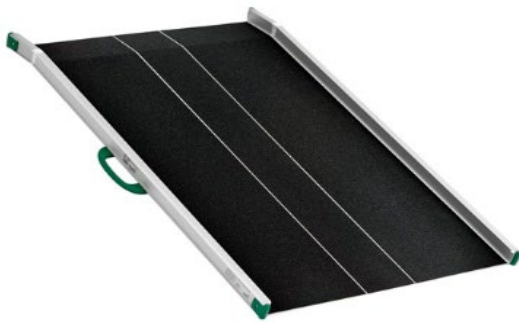32563**Ramper, hel åkyta****1-meters****30030-100** Stepless, bred fast ramp, Guldmann

Artnr	57301
Max belastning	325 kg
Invändig bredd	77 cm
Längd	100 cm
Vikt	9,7 kg
Max höjd	20 cm (elrst)
	14 cm (rst)


Max stigning 1:7 för manuell rullstol (motsvarar 8 grader eller 14%).
Max stigning 1:5 för elrullstol eller manuell rullstol som körs av medhjälpare
(motsvarar 11 grader eller 20%).

2-meters, hel åkta

VR20 Anyramp, vikbar på mitten, hel åkta, Feal AB

30070-180 Steppless, viks på bredden och ländjusteras, Guldmann

30070-210 Steppless, viks på bredden och längdjusteras, Guldmann **utanför avtal**

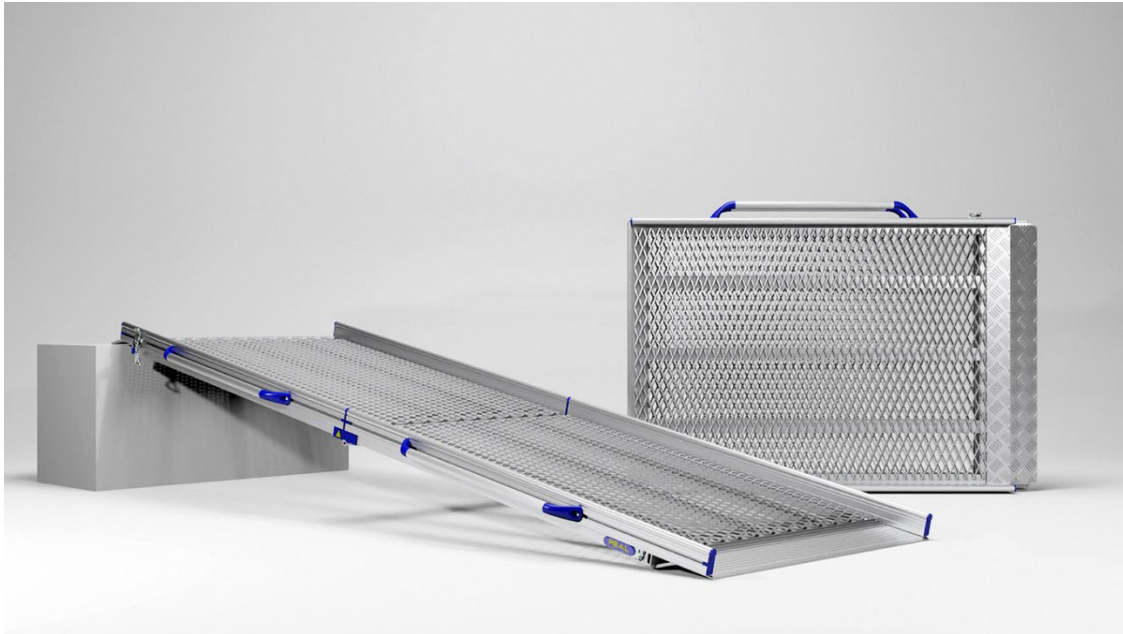

	VR20	(30070-180)	(30070-210)
Artikelnr	50158	50159	50160
Max belastning	400 kg	325 kg	325 kg
Invändig bredd	82 cm	76 cm	76 cm
Min/max längd	105/200 cm	112/183 cm	127/213 cm
Avåkningshöjd	5 cm	4,5 cm	4,5 cm
Vikt	21 kg	16,4 kg	18,9 kg
Max höjd	40 cm (elrst)		
	28,5 cm (rst)		

Max stigning 1:7 (8 grader motsvarar 14 cm/m) för manuell rullstol.

Max stigning 1:5 (11 grader motsvarar 19,4 cm/m) för elrullstol eller manuell rullstol som körs av medhjälpare.

Tröskelramper i plast

Quickramp tröskelramp finns i flera höjder. De kan kapas med mattniv(3bladskniv), för att få rätt bredd. Monteras med hjälp av dubbelhäftande Quickpads (passar till höjderna 10-20 mm) eller med Quicktape (passar till alla höjderna). Quickramp klarar max 1000 kg belastning. Se länk nedan för instruktion.

[Quickramp Montering Kapning Fastsättning](#)



Ramp	Artikelnr	Mått
QRAMP 4	57060	4x50x1000 mm
QRAMP 6	57061	6x50x1000 mm
QRAMP 8	57062	8x75x1000 mm
QRAMP 10	57063	10x100x1000 mm
QRAMP 12	57064	12x125x1000 mm
QRAMP 14	57065	14x125x1000 mm
QRAMP 16	57066	16x150x1000 mm
QRAMP 18	57067	18x150x1000 mm
QRAMP 20	57068	20x160x1000 mm
QRAMP 24	62921	24x150x1000 mm
QRAMP 28	62922	28x175x1000 mm
QRAMP 32	62923	32x200x1000 mm



QRAMP 36	62924	36x200x1000 mm
QRAMP 40	62925	40x250x1000 mm
QRAMP 44	62926	44x250x1000 mm
QRAMP 48	62927	48x250x1000 mm
QRAMP 52	62928	52x300x1000 mm
QRAMP 56	62929	56x325x1000 mm
QRAMP 60	62930	60x325x1000 mm
QTAPE-1	57257	Quicktape 1 st (räcker till en tröskelramp)
QTAPE-25	57258	Quicktape 25 st
QTAPE-100	57259	Quicktape 100 st
QPAD-25	63482	Monteringsplatta Quickramp 10 och uppåt (25-pack)

Excellent tröskelramp

Excellent ramperna finns i flera fasta höjder. De kan enkelt justeras med förhöjningsremсор så att du får den höjd som passar nivåskillnaderna. Med varje ramp följer ett lager förhöjningsremсор.

Monteringsplattor finns som tillbehör, dessa behöver du för att tröskeln ska sitta stadigt. Tröskeln kan då tas bort för rengöring under och monteringsplattan sitter kvar på golvet.

Gummiproppar sitter några på tröskelramp vid leverans. Fler kan behövas om man vill undvika den dubbelhäftande tejen som är på monteringsplattorna. Excellent tröskelramp klarar max 1000 kg belastning.

Vi rekommenderar att du tagit del av utbildning från Kvistberga för att veta hur ramperna monteras och används.



57069	Excellent tröskelramp 1 lager, lutning 1:7, 18x137x750 mm, höjd 18-26 mm, 12660
57070	Excellent tröskelramp 1 lager, lutning 1:12, höjd 20-36 mm, 12660-12
57071	Excellent tröskelramp 2 lager, 37x262x750 mm, höjd 37-53 mm, 12658
57072	Excellent tröskelramp 3 lager, 54x387x750 mm, höjd 56-72 mm, 12654
57073	Excellent tröskelramp 4 lager, 75x512x750 mm, höjd 75-91 mm, 12655
57074	Excellent tröskelramp 5 lager, 93x637x750mm, höjd 93-109 mm, 12662
57075	Excellent tröskelramp 6 lager, 112x762x750 mm, höjd 112-128 mm, 12664

57076 Excellent tröskelramp 7 lager, 131x887x750, höjd 131-147 mm, 12756

Tillbehör till Excellent tröskelramp


Självhäftande monteringsplatta  används som fixering mot golvet. Med hjälp av dubbelhäftande tejp fastnar plattan på golvet och tröskelramper hålls på plats. Rampen kan lyftas bort för rengöringen, plattan sitter kvar på golvet.

Artnr

- 57260 Självhäftande monteringsplatta (1 st)
- 57261 Självhäftande monteringsplatta (25 st)
- 57262 Självhäftande monteringsplatta (100 st)

Gummiproppar sitter på undersidan av excellentrampen och ger en viss friktion mot golvet (det sitter fem stycken gummiproppar på rampen)

Kompletera med fler gummiproppar om behov finns eller med monteringsplatta så rampen sitter stadigt.

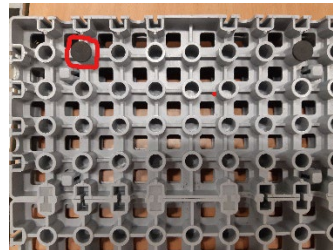

- 63542 Gummipropp 1 st
- 63541 Gummiproppar 100 st

Tröskelramper i gummi utan tejp **Utanför avtal**

Tröskelramp utan tejp, från HEA Medical AB. Finns i flera olika höjder. Bredden kan lätt kapas med bladkniv. Dubbelhäftande tejp finns som tillbehör. Tröskelramperna klarar 400 kg belastning.



Artikelnr	Ramp	Mått
57114	Tröskelramp 4 mm	4x40x900 mm
57115	Tröskelramp 6 mm	6x60x900 mm
57116	Tröskelramp 8 mm	8x80x900 mm
57117	Tröskelramp 10 mm	10x100x900 mm
57118	Tröskelramp 12 mm	12x120x9000 mm
57119	Tröskelramp 16 mm	16x150x900 mm
57120	Tröskelramp 20 mm	20x150x900 mm
57121	Tröskelramp 24 mm	24x150x900 mm
57122	Tröskelramp 306281	28x150x900 mm
57124	Tröskelramp 32 mm	32x200x900 mm
57126	Tröskelramp 36 mm	36x200x900 mm
57128	Tröskelramp 40 mm	40x200x900 mm
57130	Tröskelramp 44 mm	40x250x900 mm
57132	Tröskelramp 48 mm	48x250x900 mm
57134	Tröskelramp 52 mm	52x300x900 mm
57136	Tröskelramp 56 mm	56x300x900 mm
57138	Tröskelramp 60 mm	60x300x900 mm

57140

Tröskelramp 70 mm

70x300x900 mm

Tillbehör

Tejp till HEA tröskelramper, dubbelhäftande

Artnr

57268 60-100 mm 4 st

57269 200-300 mm 8 st

57270 60-300 mm , rulle ca 1000 st

Portabla ramper, hel åkya lättvikt

Stepless EasyFold Pro, Guldmann



Vikbar på mitten, ihopvikt bredd 39,8 cm.

Invändig bredd 76 cm. Kanthöjd 40mm/50mm. Max belastning 350 kg

Artikelnr	Ramp	Mått	Vikt	
57085	EasyFold Pro 93	93,5 cm	7,8 k	max höjd elrst 18 cm, rst 13 cm
57086	EasyFold Pro 118	118,5	9,0 kg	max höjd elrst 23,5 cm, rst 16,5 cm
57087	EasyFold Pro 148	148,5 cm	11,4 kg	max höjd elrst 29,5 cm, rst 20,5 cm
57088	EasyFold Pro 178	178,5 cm	13,4 kg	max höjd elrst 35,5 cm, rst 25 cm
57089	EasyFold Pro 208	208,5 cm	15,8 kg	max höjd elrst 41,5 cm, rst 29 cm

Stepless Lite, Guldmann

Invändig bredd 76 cm, kanthöjd 2,5 cm, ihopvikt bredd 39 cm.

Max belastning 300 kg



Artnr	Ramp		Mått	Vikt	
39108	30100-070	Utanför avtal	70 cm	3,5 kg	max höjd elrst 14 cm, rst 9,5cm
50151	30100-085	Utanför avtal	85 cm	4 kg	max höjd elrst 17 cm, rst 12 cm
48875	30100-125		125 cm	6 kg	max höjd elrst 25 cm, rst 17,5cm
40808	30100-165		165 cm	7,5 kg	max höjd elrst 33 cm, rst 23 cm
51319	30100-205		205 cm	9,5 kg	max höjd elrst 41 cm, rst 28,5cm

Kvistberga **Utanför avtal**

Careslope

Invändig bredd 70 cm, kanthöjd 2,5 cm, Maxvikt 300 kg



Artikenr	Ramp	Mått	Vikt
57053	CareSlope 65	65 cm	3 kg
57054	CareSlope 100	100 cm	5 kg
57055	CareSlope 120	120 cm	6 kg
57056	CareSlope 150	150 cm	8 kg
57057	CareSlope 175	175 cm	9 kg

Carbonramp, HEA Medical

Bredd 78 cm, längd 82 cm



Artikelnr	Ramp	Mått	Vikt
62895	Carbonramp	82 cm	3 kg

Max höjd elrst 16,8 cm. Max höjd rullstol 11,5 cm.

iRamp Portabel, IRP

Invändig bredd 76 cm, ihopvikt bredd 5,5 cm, maxvikt 400kg



Artikelnr	Ramp	Mått	Vikt	
62770	IRP050	52 cm	3,8 kg	max höjd elrst 10 cm, rst 7 cm
62771	IRP090	92 cm	6,5 kg	max höjd elrst 20 cm, rst 12,5
56246	IRP120	116 cm	8,7 kg	max höjd elrst 25 cm, rst 16 cm
62772	IRP150	150 cm	10 kg	max höjd elrst 30 cm, rst 21 cm
62773	IRP170	167 cm	12,5 kg	max höjd elrst 35 cm, rst 23 cm
52598	IRP200	200 cm	14,7 kg	max höjd elrst 40 cm, rst 28 cm