

## S-AFP

**Synonymer**  
Alfa-fetoprotein

NPU02043

### Provtagningsmateriel

**Rör:** Guldgul propp

**Tillsats:** Koagulationsaktivator, gel

[Länk till information för beställning](#)



### Information

**Laboratorium**  
Falun

**Ackrediterad**  
Ja

**Utförs akut**  
Nej

**Biobanksprov**  
Nej

### Beställning/Remiss

Elektronisk beställning inom Region Dalarna

Alternativ: Pappersremiss [Klinisk kemi](#)

### Referensintervall

**Ålder**  
≥1 år  
(ej gravida)

**KIE/L**  
<5,8

### Provtagning

För patienter som behandlas med höga biotindoser (>5 mg/dag) bör prov tas tidigast 8 timmar efter senaste dosen.

[Venprovtagning](#)

### Provmängd

Röret bör fyllas till angiven markering eller volym på röret. För rör som inte uppnår angiven volym kan svar inte garanteras.

### Provhantering

**Hållbarhet**  
[Generell hantering av blodprover efter provtagning](#)

**Centrifugering**  
[Centrifugering](#)

#### Pappersutskrift

Utskrivna dokument är ej dokumentstyrda och skall kontrolleras för utgåva innan användning.

KLINISK KEMI  
Provtagningsanvisning

---

## Svarstid

---

Förväntad svarstid för rutinprover är inom sex timmar från ankomst till utförande laboratorium under dagtid på helgfri vardag.

---

## Svar/Bedömning

---

### Tolkningsstöd

Omvandlingsfaktorer:

$\mu\text{g/L} \times 0,83 = \text{kIE/L}$

$\text{kIE/L} \times 1,21 = \mu\text{g/L}$

---

## Medicinsk bakgrund/Metodinformation

---

[Länk till metodinformation](#)

---

## Dokumenthistorik (tre senaste utgåvorna)

Utgåva	Rubrik	Förändring
1		Nytt dokument.

### Pappersutskrift

Utskrivna dokument är ej dokumentstyrda och skall kontrolleras för utgåva innan användning.