

## P-ALP

### Synonymer

Alkaliskt fosfatas

NPU53078

### Provtagningsmateriel

Rör: Mintgrön propp

Tillsats: Li-heparin med gel

[Länk till information för beställning av provtagningsmateriel](#)

### Information

#### Laboratorium

Avesta, Falun och Mora

#### Ackrediterad

Ja

#### Utförs akut

Ja

#### Biobanksprov

Nej

### Beställning/Remiss

Elektronisk beställning inom Region Dalarna

Alternativ: Pappersremiss [Klinisk kemi](#)

### Referensintervall

**Ålder**                      **µkat/L****Barn**

<6 mån	Saknas
6 mån-<2 år	1,9-8,3
2-<9 år	2,0-5,0
9-<15 år	1,4-8,7

**Flickor**

15-&lt;18 år                      0,70-4,0

**Pojkar**

15-&lt;18 år                      1,2-5,6

**Vuxna**

≥18 år                              0,70-1,9

### Provtagning

[Venprovtagning](#)

### Provmängd

Röret bör fyllas till angiven markering eller volym på röret. För rör som inte uppnår angiven volym kan svar inte garanteras.

### Provhantering

#### Hållbarhet

[Generell hantering av blodprover efter provtagning](#)

#### Centrifugering

[Centrifugering](#)

#### Pappersutskrift

Utskrivna dokument är ej dokumentstyrda och skall kontrolleras för utgåva innan användning.

---

## Svarstid

---

Förväntad svarstid vid akutbeställning är inom 60 minuter från ankomst till utförande laboratorium.

Förväntad svarstid för rutinprover är inom sex timmar från ankomst till utförande laboratorium under dagtid på helgfri vardag.

---

## Svar/Bedömning

---

Se referensintervall.

---

## Medicinsk bakgrund/Metodinformation

---

[Länk till metodinformation](#)

---

## Dokumenthistorik (tre senaste utgåvorna)

Utgåva	Rubrik	Förändring
3		
2		
1		Nytt dokument.

### Pappersutskrift

Utskrivna dokument är ej dokumentstyrda och skall kontrolleras för utgåva innan användning.