

P-hCG

Synonymer

Humant koriongonadotropin, total β -hCG, intakt plus fri betakedja

NPU19579

Provtagningsmateriel

Rör: Mintgrön propp

Tillsats: Litiumheparin och gel

[Länk till information för beställning](#)

Information

Laboratorium
Falun och Mora**Ackrediterad**
Ja**Utförs akut**
Ja**Biobanksprov**
Nej

Beställning/Remiss

Elektronisk beställning inom Region Dalarna

Alternativ: Pappersremiss [Klinisk kemi](#), Övrigt

Referensintervall

Ålder
 ≥ 6 mån – < 18 år **IE/L**
<2**Kvinnor**
 ≥ 18 – < 50 år
(icke gravida) <2
 ≥ 50 år
(postmenopaus) <8**Män** <2

Provtagning

Ingen speciell förberedelse behövs med undantag för patienter som behandlas med höga biotindoser (dvs. > 5 mg/dag). Provet bör inte tas tidigare än 8 timmar efter senaste biotindosen.[Venprovtagning](#)

Provmängd

Röret bör fyllas till angiven markering eller volym på röret. För rör som inte uppnår angiven volym kan svar inte garanteras.

Provhantering

Hållbarhet

Ocentrifugerat i rumstemperatur: 3 tim

Ocentrifugerat i kyla (2 – 8 °C): 3 tim

Centrifugerat i kyla (2 – 8 °C): 24 tim

Centrifugerat och avhållt i kyla (2 – 8 °C): 3 dygn

Centrifugerat och avhållt i frys (-20 °C): 12 mån

Pappersutskrift

Utskrivna dokument är ej dokumentstyrda och skall kontrolleras för utgåva innan användning.

KLINISK KEMI
Provtagningsanvisning**Centrifugering**
[Centrifugering](#)**Svarstid**

Förväntad svarstid vid akutbeställning är inom 90 minuter från ankomst till utförande laboratorium.

Förväntad svarstid för rutinprover är inom sex timmar från ankomst till utförande laboratorium under dagtid på helgfri vardag.

Svar/Bedömning

Se Referensintervall. Referensintervall för gravida kvinnor anges i metodinformation, se länk nedan.

Medicinsk bakgrund/Metodinformation

Metoden bestämmer intakt hCG + fria betakedjor.

[Länk till metodinformation](#)

Dokumenthistorik (tre senaste utgåvorna)

Utgåva	Rubrik	Förändring
1		Nytt dokument.

Pappersutskrift

Utskrivna dokument är ej dokumentstyrda och skall kontrolleras för utgåva innan användning.