

Hepatit C-virus (HCV)-RNA, kvantitativ PCR, P/S-

Synonymer

HCV RNA, kvantitativ PCR analys

Indikation

Bedömning, behandlingsindikationer och uppföljning av virusnivåer under behandling för HCV infektion, samt konfirmation av infektionen.

HCV- infektion är en anmälningspliktig sjukdom enligt smittskyddslagen.

Provtagningsmateriel

Rör: EDTA, Lila propp, 7 mL
Guldgul propp med gel, utan tillsats

[Länk till information för beställning](#)



Information

Laboratorium
Klinisk mikrobiologi Falun

Ackrediterad
Ja

Biobanksprov
Ja

Beställning/Remiss

Elektronisk beställning inom Region Dalarna

Alternativ: Pappersremiss [Odling/PCR](#)

Remissuppgifter

[Uppgifter som skall fyllas i på remissen vid beställning](#)

Metod

Kvantitativ PCR

Provtagning

Provmaterial
Serum, plasma

Utförande
[Venprovtagning](#)

Provmängd

Pappersutskrift

Utskrivna dokument är ej dokumentstyrda och skall kontrolleras för utgåva innan användning.

Röret skall fyllas till angiven markering eller volym på röret. För rör som inte uppnår angiven volym kan svar inte garanteras.

Minsta provmängd blod 3 mL, rekommenderad 7 mL.
Minsta provmängd plasma 2 mL.
Minsta provmängd serum 2 mL.

Provhantering

Hållbarhet

Plasma: Hållbart max 1 dygn i kyla.
Centrifugerat och avhållt plasmaprov kan förvaras kylt max 6 dygn.

Serum: Hållbart max 1 dygn i kyla eller rumstemperatur
Centrifugerat och avhållt serumprov kan förvaras kylt max 6 dygn.

Centrifugering

Ja

Förvaring

Förvaras i kyl i väntan på transport.

Transport

Transport till laboratoriet bör ske så fort som möjligt.
Transporteras kylt utanför Falu lasarett.

Svarstid

Analys utförs 1-2 gånger i veckan

Svar

HCV RNA: Positiv (>15 IE/mL, svara med IE/mL)
HCV RNA: Positiv (<15 IE/mL, med kommentar: HCV RNA påvisat men under metodens mätområde)
HCV RNA: Negativ (<15 IE/mL)

Metodinformation

[Länk till metodinformation](#)

NPU14475

Dokumenthistorik (tre senaste utgåvorna)

| Utgåva | Rubrik | Förändring |
|--------|--------|------------|
| 3 | | |

Pappersutskrift

Utskrivna dokument är ej dokumentstyrda och skall kontrolleras för utgåva innan användning.

| | | |
|---|--|----------------------------------|
| 2 | | Kompletterat förvaring av prover |
| 1 | | Nytt dokument. |
