

B- Leukocyter klass

Synonymer

Differentialräkning av leukocyter, Diff, LPK klass

Lymfocyter, monocyter, neutrofiler, eosinofiler, basofiler

NPU18156

Provtagningsmateriel

Rör: Lila propp

Tillsats: EDTA

[Länk till information för beställning av provtagningsmateriel](#)

Materiel: Objektglas med skrivvyta

Beställs via Raindance Marknadsplats,
art.nr 105627.

Antal i förpackning: 50 st

Minsta beställning: 1 förpackning



Information

Laboratorium

Avesta, Falun, Ludvika
och Mora

Ackrediterad

Nej

Utförs akut

Nej

Biobanksprov

Nej

Beställning/Remiss

Elektronisk beställning inom Region Dalarna

Alternativ: Pappersremiss [Klinisk kemi](#)

B-Leukocyter beställs automatiskt samtidigt.

Referensintervall

Ålder

B-Lymfocyter

x10⁹/L

0 – <1 mån 2,0–9,0

1 – <2 mån 3,0–16,0

2 – <6 mån 4,0–12,0

6 mån – <6 år 1,8–7,8

6 – <13 år 1,3–4,1

13 – <18 år 1,2–3,6

≥18 år 1,1–4,8

Provtagning

[Venprovtagning](#)[Kapillärprovtagning](#)

B-Monocyter

x10⁹/L

0 – <1 mån 0,1–2,0

1 – <6 mån 0,1–1,2

6 mån – <18 år 0,2–0,8

≥18 år 0,1–1,0

Pappersutskrift

Utskrivna dokument är ej dokumentstyrda och skall kontrolleras för utgåva innan användning.

Provmängd

Röret bör fyllas till angiven markering eller volym på röret. För rör som inte uppnår angiven volym kan svar inte garanteras.

Vid vissa tillfällen krävs ytterligare utredning av medicinskt avvikande resultat eller larm. Det kan då behövas manuell bedömning av B-Leuk klass. Laboratoriemedicin rekommenderar därför att minst 3 kapillära blodutstryk medföljer EDTA-röret. Blodutstryken märks med samma beställningsnummer som blodröret.

Se filmer för mer information om utstryksteknik.

[Utstrykningsteknik 1](#)

[Utstrykningsteknik 2](#)

B-Neutrofiler	x10 ⁹ /L
0 – <7 dygn	3,0–14,0
7dygn – <6 mån	1,0–9,0
6 mån – <15 år	1,6–6,7
15 – <18 år	2,0–9,6
≥18 år	1,7–7,5

B-Eosinofiler	x10 ⁹ /L
0 – <7 dygn	0,1–2,0
7dygn – <6 mån	0,1–1,0
6 mån – <14 år	0,05–0,7
14 – <18 år	0,03–0,6
≥18 år	0,1–0,6

B-Basofiler	x10 ⁹ /L
0 – <18 år	0,05–0,1
≥18 år	0,0–0,1

Provhantering

Hållbarhet

Ocentrifugerat i rumstemperatur: 24 tim

Ocentrifugerat i kyla (2 – 8 °C): 24 tim

Angiven hållbarhet gäller för maskinell klassificering. Vid kompletterande morfologisk bedömning rekommenderas samtidigt tagna kapillära utstryk, se ovan. Utstryk från EDTA-rör behöver göras inom 4 tim från provtagning.

Centrifugering

Centrifugeras ej.

Svarstid

Inom ett dygn helgfria vardagar. Vid akuta behov efter överenskommelse per telefon.

Svar/Bedömning

Se referensintervall

Medicinsk bakgrund/Methodinformation

[Länk till metodinformation](#)

Dokumenthistorik (tre senaste utgåvorna)

Utgåva	Rubrik	Förändring
1		Nytt dokument.

Pappersutskrift

Utskrivna dokument är ej dokumentstyrda och skall kontrolleras för utgåva innan användning.