

## Mononukleos, heterofila antikroppar, B/P/S-

### Indikation

Vid misstanke om infektiös mononukleos.

### Provtagningsmateriel

**Rör:** Guldgul med gel, röd, lila, mintgrön eller mörkblå propp

[Länk till information för beställning](#)

### Information

**Laboratorium**  
Klinisk mikrobiologi Falun

**Ackrediterad**  
Nej

**Biobanksprov**  
Nej

### Beställning/Remiss

Elektronisk beställning inom Region Dalarna

Alternativ: Pappersremiss [Serologi/Immunologi](#)

### Remissuppgifter

[Uppgifter som skall fyllas i på remissen vid beställning](#)

### Metod

Kromatografisk  
immunanalys snabbtest

### Provtagning

#### Provmaterial

Blod, plasma, serum

#### Provmängd

Röret skall fyllas till angiven markering eller volym på röret. För rör som inte uppnår angiven volym kan svar inte garanteras.

Minsta provmängd venprov 1 mL.

Minsta provmängd i mikrorör 500 µL.

#### Pappersutskrift

Utskrivna dokument är ej dokumentstyrda och skall kontrolleras för utgåva innan användning.

---

## Provhantering

---

### Hållbarhet

Serum och plasma: 3 dagar i kylskåp (2-8 °C).  
Blod: 2 dagar i kylskåp (2-8 °C).

Provet ska vara rumstempererat vid analys.

### Förvaring

Förvaras i kyl i väntan på transport.

### Transport

Provet ska skickas så snart som möjligt.  
Transporteras kylt utanför Falu lasarett.

[Generell hantering av rör efter provtagning](#)

---

## Svarstid

---

Utförs alla dagar.

Slutsvar lämnas samma dag som provet ankommer lab (gäller under mikrobiologlabbets öppettider).

---

## Svar/bedömning

---

Påvisade/Ej påvisade

---

## Metodinformation

---

[Länk till Metodinformation](#)

NPU56027

---

## Dokumenthistorik (tre senaste utgåvorna)

Utgåva	Rubrik	Förändring
3		
2		
1		Nytt dokument.

### Pappersutskrift

Utskrivna dokument är ej dokumentstyrda och skall kontrolleras för utgåva innan användning.