

B-PEth

Synonymer

Forfatidyletanol

NPU28874

Provtagningsmateriel

Rör: Lila propp

Tillsats: EDTA

[Länk till information för beställning](#)

Information

Laboratorium
Falun**Ackrediterad**
Ja**Utförs akut**
Nej**Biobanksprov**
Nej

Beställning/Remiss

Elektronisk beställning inom Region Dalarna

Alternativ: Pappersremiss [Klinisk kemi](#), Övrigt

Referensintervall

Saknas

Se Svar/bedömning

Provtagning

[Venprovtagning](#)

Prov bör tas på nykter patient.

Provmängd

Röret bör fyllas till angiven markering eller volym på röret. För rör som inte uppnår angiven volym kan svar inte garanteras.

Provhantering

Hållbarhet

Ocentrifugerat i rumstemperatur: 1 v

Ocentrifugerat i kyla (2 – 8 °C): 3 v

Prover får ej förvaras i frys -20°C

Pappersutskrift

Utskrivna dokument är ej dokumentstyrda och skall kontrolleras för utgåva innan användning.

KLINISK KEMI
Provtagningsanvisning**Centrifugering**

Ska ej centrifugeras

Svarstid

Inom en vecka.

Svar/Bedömning**Beslutsgränser:**

<0,05 µmol/L ingen eller låg alkoholkonsumtion

0,05 - 0,3 µmol/L måttlig konsumtion.

Hos vissa individer särskilt i intervallets övre del kan det tyda på överkonsumtion.

>0,30 µmol/L talar för överkonsumtion av alkohol. Ju högre värde desto säkrare blir slutsatsen.

Medicinsk bakgrund/Methodinformation[Länk till metodinformation](#)**Dokumenthistorik (tre senaste utgåvorna)**

Utgåva	Rubrik	Förändring
1		Nytt dokument.

Pappersutskrift

Utskrivna dokument är ej dokumentstyrda och skall kontrolleras för utgåva innan användning.