

Csv-Spektrofotometri

Synonymer: Csv-Absorbans, Csv-Bilirubin

Provtagningsmateriel

Rör (csv): Polypropylenrör 10 mL med gul skruvpropp

Tillsats: -

Rör (plasma): Mintgrön propp

Tillsats: Li-heparin med gel

[Länk till information för beställning](#) (Csv)

[Länk till information för beställning](#) (venprov)



Information

Laboratorium
Falun

Akrediterad
Nej

Utförs akut
Ja

Biobanksprov
Nej

Beställning/Remiss

Elektronisk beställning inom Region Dalarna

Alternativ: Pappersremiss [Klinisk kemi](#)

Remissuppgifter

Notera tid för lumbalpunktion samt tid efter symptomdebut i Cosmic.

Vid beställning av Csv-Spektrofotometri läggs automatiskt beställning till för analys av Csv-Albumin, P-Albumin samt P-Bilirubin.

Referensintervall

Provtagning

Provet bör tas tidigast 12 h efter symptomdebut. Minst 1 mL cerebrospinalvätska som ljusskyddas t ex med aluminiumfolie. Numrera rören i tappningsordning. Lämnas omedelbart till kem lab. Plasmaprov för Albumin och Bilirubin tas samtidigt.

Provmängd

Venprov: Röret ska fyllas till angiven markering eller volym på röret.
Csv-prov: Minsta provmängd 1 mL.

För rör som inte uppnår angiven volym kan svar inte garanteras.

Provhantering

Pappersutskrift

Utskrivna dokument är ej dokumentstyrda och skall kontrolleras för utgåva innan användning.

KLINISK KEMI
Provtagningsanvisning

Cerebrospinalvätskeprovet transporteras omedelbart till kem lab och centrifugeras inom 30 min efter provtagningen.

Hållbarhet

Ocentrifugerat i rumstemperatur: 30 min
Centrifugerat och avhållt i kyla (2 – 8 °C): 24 tim

Förvaring

Ljusskyddat.

Svarstid

Förväntad svarstid vid akutbeställning är inom 60 minuter från ankomst till utförande laboratorium.

Förväntad svarstid för rutinprover är inom sex timmar från ankomst till utförande laboratorium under dagtid på helgfri vardag.

Svar/Bedömning

För bedömning av resultat: Se utlåtande

Medicinsk bakgrund/Metodinformation

[Länk till metodinformation](#)

Dokumenthistorik (tre senaste utgåvorna)

Utgåva	Rubrik	Förändring
1		Nytt dokument.

Pappersutskrift

Utskrivna dokument är ej dokumentstyrda och skall kontrolleras för utgåva innan användning.