

## S-TRAK

### Synonymer

TSH-receptorantikroppar, Tyreotropinreceptor-antikroppar

NPU17888

### Provtagningsmateriel

**Rör:** Guldgul propp**Tillsats:** Koagulationsaktivator, gel[Länk till information för beställning av provtagningsmateriel](#)

### Information

**Laboratorium**  
Falun**Ackrediterad**  
Ja**Utförs akut**  
Nej**Biobanksprov**  
Nej

### Beställning/Remiss

Elektronisk beställning inom Region Dalarna

Alternativ: Pappersremiss [Klinisk kemi](#), Övrigt

### Referensintervall

Saknas.

Se Svar/Bedömning.

### Provtagning

Prov bör inte tas tidigare än 8 timmar efter senaste biotindosen på patienter som behandlas med höga doser biotin (&gt;20 mg/dag).

Prov bör ej tas under pågående behandling med natriumheparin/ofraktionerat heparin.

[Venprovtagning](#)

### Provmängd

Röret bör fyllas till angiven markering eller volym på röret. För rör som inte uppnår angiven volym kan svar inte garanteras.

### Provhantering

#### Hållbarhet

[Generell hantering av blodprover efter provtagning](#)

#### Centrifugering

[Centrifugering](#)

#### Pappersutskrift

Utskrivna dokument är ej dokumentstyrda och skall kontrolleras för utgåva innan användning.

---

## Svarstid

Förväntad svarstid inom tre dagar från ankomst till utförande laboratorium.

---

## Svar/Bedömning

### Beslutsgräns

Barn och vuxna:  
≥1,75 IE/L

### Tolkningsstöd

Resultaten bör tolkas i sitt kliniska sammanhang. Värden nära beslutsgräns bör bedömas med försiktighet och bör följas upp med nytt prov efter några månader.

---

## Medicinsk bakgrund/Methodinformation

[Länk till metodinformation](#)

---

## Dokumenthistorik (tre senaste utgåvorna)

Utgåva	Rubrik	Förändring
1		Nytt dokument.