

## B-Trombocyter

### Synonymer

TPK, Trc, PLT

NPU03568

### Provtagningsmateriel

Rör: Lila propp

Tillsats: EDTA

[Länk till information för beställning av  
provtagningsmateriel](#)

### Information

#### Laboratorium

Avesta, Falun, Ludvika och  
Mora

#### Akrediterad

Ja

#### Utförs akut

Ja

#### Biobanksprov

Nej

### Beställning/Remiss

Elektronisk beställning inom Region Dalarna

Alternativ: Pappersremiss [Klinisk kemi](#)

### Referensintervall

Ålder	x10 <sup>9</sup> /L
0 – <3 dygn	100–450
3 dygn – <2 mån	160–500
2 – <3 mån	210–650
3 – <6 mån	200–550
6 mån – <11 år	210–590
11 – <18 år	190–460

### Provtagning

[Venprovtagning](#)

#### Kvinnor

≥18år 165–390

#### Män

≥18år 145–350

### Provmängd

Röret bör fyllas till angiven markering eller volym på röret. För rör som inte uppnår angiven volym kan svar inte garanteras.

### Provhantering

#### Hållbarhet

Ocentrifugerat i rumstemperatur: 48 tim

Ocentrifugerat i kyla (2 – 8 °C): 48 tim

#### Centrifugering

Centrifugeras ej.

### Pappersutskrift

Utskrivna dokument är ej dokumentstyrda och skall kontrolleras för utgåva innan användning.

**Trombocyter, B-**KLINISK KEMI  
Provtagningsanvisning

---

**Svarstid**

---

Förväntad svarstid vid akutbeställning är inom 60 minuter från ankomst till utförande laboratorium.

Förväntad svarstid för rutinprover är inom sex timmar från ankomst till utförande laboratorium under dagtid på helgfri vardag.

---

**Svar/Bedömning**

---

Se referensintervall.

---

**Medicinsk bakgrund/Metodinformation**

---

[Länk till metodinformation](#)

(Åtkomst endast inom Region Dalarna. Övriga: Kontakta klinisk kemi vid behov av metodinformation)

Befintliga Sysmex hematologiinstrument använder för B-Trombocyter metodprincipen impedans. Vid vissa larm växlar instrumentet automatiskt över till annan bättre lämpad metod om sådan finns tillgänglig; i Falun och Mora fluorescerande kanal (PLT-F), i Avesta optisk kanal (RET). Vid svar på B-Trombocyter går det inte att utläsa vilken metod som använts av instrumentet. Analysen B-Trombocyter är ackrediterad för samtliga metoder.

---

**Dokumenthistorik (tre senaste utgåvorna)**

Utgåva	Rubrik	Förändring
2	Medicinsk bakgrund	Justerat länk metodinfo.
1		Nytt dokument

**Pappersutskrift**

Utskrivna dokument är ej dokumentstyrda och skall kontrolleras för utgåva innan användning.